

L-QA12/00 - 4	لیست
	مدت زمان نگهداری و نحوه امحاء نمونه های آزمایش آزمایشگاه دکتر آگنج

سفید			واینکس 1/10 به مدت حداقل 30 دقیقه قرار داده و سپس طبق دستورالعمل شستشو ، شسته می شوند .	ریخته و سوزانده میشوند .
شمارش رتیکولوسیت	حداکثر تا 6 ساعت در دمای اتاق	خون کامل حداکثر 72 ساعت در 4°C	//	//
تعیین گروه خونی و RH	حداکثر تا 48 ساعت در دمای اتاق	خون کامل تا 7 روز در دمای یخچال	//	//
اندازه گیری زمان سدیماتاسیون خون	حداکثر در فاصله زمانی 4 ساعت بعد از نمونه گیری	حداکثر 12 ساعت در دمای 4°C	//	//
اندازه گیری هموگلوبین A2 و الکتروفورز	-	خون کامل حداکثر تا 8 روز در دمای 4°C	//	//
آزمایشگاه انگل شناسی				
نمونه مدفوع آبکی نمونه مدفوع شل نمونه مدفوع نرم نمونه مدفوع شکل دار	تا مدت 30 دقیقه تا مدت 30 دقیقه تا مدت 60 دقیقه همان روز و یا روز بعد در یخچال 3 – 5 °C	-	-	ظروف حاوی نمونه در ظروف Safety box ریخته و سوزانده میشوند
در غیر اینصورت بعد از بررسی خصوصیات ظاهری و انجام آزمایش مستقیم از نظر بررسی حرکت تروفوزوئیت تک یاخته در فرمالین 10% قرار داده می شود .				
آزمایشگاه سیتولوژی و پاتولوژی				
نمونه های بافتی	زمان لازم جهت Fix شدن نمونه (معمولاً 24 ساعت) ، چنانچه نمونه Fix نشده ، بزرگ یا استخوانی باشد مدت زمان طولانی تر لازم است .	- نمونه های بافتی بدست آمده بطریق Surgical ، 2 هفته بعد از آماده شدن گزارش و جواب نهایی - نمونه های تهیه شده بطریق Autopsy ، 3 ماه بعد از گزارش نهایی .	-	در صورت وجود اعضاء بدن و نمونه های اتوپسی به طریق شرعی عمل خواهد شد در غیر اینصورت در ظروف Safety box ریخته و سوزانده میشوند
بلوکهای پارافینی	بلافاصله بعد از بلوک گیری جهت تهیه اسلایدهای پاتولوژی بوسیله دستگاه میکروتوم برش خواهد خورد.	5 سال	-	در کیسه زیاله ریخته می شوند
اسلایدهای پاتولوژی	تا زمان بررسی توسط متخصص آسیب شناسی و تهیه گزارش نهایی	10 سال	-	در کیسه زیاله ریخته می شوند
اسلایدهای سیتولوژی	متغییر ، بسته به زمان رنگ آمیزی	- اسلایدهای سیتولوژی مثبت 5 سال - اسلایدهای سیتولوژی منفی 5 سال - اسلایدهای حاصل از	-	در کیسه زیاله ریخته می شوند

محل مهر تضمین کیفیت	
تاریخ :	تاریخ :